

**Pred uporabo protibolečinskih obližev CANNASEN® CBD Pain Patch natančno preberite navodila za uporabo.**

**Kako delujejo protibolečinski obliži CANNASEN® CBD Pain Patch?**

**CANNASEN® CBD Pain Patch** je izdelek za topično uporabo, vsebuje raztopino akrilatnega polimera, ki:

- pomaga lajšati bolečine v mišicah in sklepih.

**CANNASEN® CBD Pain Patch** je medicinski pripomoček. Učinkovitost in varnost sta bili testirani skladno z Evropsko direktivo za medicinske pripomočke (93/42/EGS).

**Princip delovanja protibolečinskih obližev CANNASEN® CBD Pain Patch**

**CANNASEN® CBD Pain Patch** se uporablja za blažitev bolečine v mišicah in sklepih (artritis, bolečine v spodnjem delu hrbta, zvini, športne poškodbe). **CANNASEN® CBD Pain Patch** nudi dolgotrajno olajšanje bolečin.

**Področja uporabe**

Za blažitev bolečin v mišicah in sklepih kot so artritis, bolečine v spodnjem delu hrbta, zvini, športne poškodbe.

**Navodila za odmerjanje, vrsta in trajanje uporabe**

**CANNASEN® CBD Pain Patch** se lahko uporablja le na koži. Pred uporabo očistite in osušite prizadeto mesto. Odstranite zgornji del obliža in ga namestite na prizadeti del telesa. Obliža ne namestite na poškodovano ali vneto kožo (kot je opraskano, opečeno, okuženo ali na ureznine ali izpuščaje). Obliž se lahko uporablja 1 x dnevno.

Sledite vsem navodilom na embalaži.

Obliž odstranite pred tuširanjem in ga ne prilepite nazaj takoj po tuširanju. Ne povijajte mesta, kjer je obliž. Ne pokrivajte obliža z grelno blazino, saj s tem povečate možnost pojava stranskih učinkov.

Če že uporabljate druge izdelke na koži, kjer bi imeli obliž, dobro sperite mesto in počakajte vsaj 2 uri pred namestitvijo obliža. Skrbno si umijte roke po uporabi obliža. Izogibajte se stiku obliža z očmi, nosom in usti. Ko odstranite obliž, ga prepognite na pol tako, da je lepljiva stran na notranji strani, in zavržite obliž med gospodinjske odpadke.

Izdelek je namenjen za začasno uporabo.

V primeru da po 2-3 dneh po začetku uporabe ni izboljšanja oz. če se simptomi močno poslabšajo, se posvetujte z zdravnikom.

**Splošni previdnosti ukrepi**

- Le za zunanjo uporabo.
- Ne uporabljajte izdelka na poškodovani koži.
- Izognite se stiku z očmi. Dobro si umijte roke po uporabi.
- Ni primerno za otroke in mladostnike do 14 leta. Razen po posvetu z zdravnikom.
- Hranite izven dosega malih otrok.
- Hranite izven dosega živali.
- Ljudje z alergijami na alkohol, topila ali pa na katerokoli sestavino v izdelku ne smejo uporabljati tega izdelka.
- Med nosečnostjo in dojenjem lahko uporabite le po posvetu z zdravnikom.

# SLO: CANNASEN® CBD Pain Patch - navodila za uporabo

razl. 1.0 / april 2021

## Kontraindikacije

**Protibolečinskega obliža CANNASEN® CBD Pain Patch** ne smete uporabljati, če ste preobčutljivi na katerokoli sestavino izdelka.

## Interakcije

Da se izognete interakcijam z drugimi zdravili, izdelek nanesite z zamikom (pred ali po) dveh ur, oziroma se posvetujte z zdravnikom.

## Poročilo o nezgodi

Če je ta izdelek povezan z resno nezgodo (smrt pacienta ali druge osebe ali začasnim ali dolgotrajnim poslabšanjem zdravja pacienta ali druge osebe; resna nevarnost javnemu zdravju), to prijavite proizvajalcu, distributerju in JAZMP.

## Informacije in navodila glede roka uporabnosti medicinskega pripomočka

**Protibolečinski obliž CANNASEN® CBD Pain Patch** se lahko uporablja le do datuma, označenega na škatlici izdelka (uporabno do konca). Zaradi narave sestavin lahko s časom pride do manjše spremembe barve izdelka. To ne vpliva na kakovost izdelka.

## Vsebina pakiranja

Originalno pakiranje z 8 obliži.

## Sestava

Aktivne sestavine: akrilatni kopolimer, etil acetat, etanol, heptan, pentandion. Druge sestavine: kanabidiol (CBD), tinktura arnike, mentol. Vsebuje alkohol. Brez konzervansov in barvil.

## Shranjevanje

Hranite na hladnem (med 10°C - 25°C) in suhem mestu, zaščiteno pred sončno svetlobo.

## Odstranjevanje

Izdelek lahko po uporabi zavržete med običajne gospodinjske odpadke.

**Distributer:** NaturaMedica d.o.o., Novi dom 33b, SI-1420 Trbovlje, tel. 0356 30022

## Pomen simbolov na pakiranju:



Proizvajalec  
CANNORDIC A/S  
Fruebjergvej 3  
Copenhagen 2100  
Danska



Simbol CE



Temperaturno  
območje



Uporabno  
do konca



Preberite  
navodilo  
za uporabo



Številka  
serije/lot



Zaščitite  
pred  
sončno  
svetlobo



Ne uporabljajte,  
če je embalaža  
poškodovana



Hranite  
na suhem



Ne  
uporabite  
ponovno