

SISTEM MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

DeflaGyn® 

APLIKACIJSKI SET /
APLIKATORJI ZA VEČKRATNO UPORABO

Sestava	Na aplikacijo
Visoko dispergirani silicijev dioksid	10,0 mg
Citronska kislina	24,8 mg
Natrijev selenit	0,83 mg
Ekvivalent selena	0,25 mg

Pomožne snovi: hidroksietil celuloza, voda.

Konzervansi: kalijev sorbat, natrijev benzoat.

Posebna opozorila: Vaginalni gel DeflaGyn® je treba uporabljati le po posvetovanju z zdravnikom. Za dodatne informacije preberite povzetek navodil za uporabo.

Pogoji shranjevanja: Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti. Hranite zunaj dosega otrok! Pred uporabo pretresite.

Kako dolgo naj uporabljam DeflaGyn®?

Uporabnice, ki nimajo menstruacije

DeflaGyn® se uporablja v trajanju 3 x 28 dni. Po 28 dneh uporabe prenehajte uporabljati intravaginalni gel DeflaGyn® za 3 dni. Nato nadaljujte z uporabo še 28 dni in ponovno prekinite za 3 dni. Zatem nadaljujte s tretjim ciklom zdravljenja.

Uporabnice z menstruacijo


Ne uporabljajte intravaginalnega gela DeflaGyn® med menstruacijo (približno 3-5 dni na cikel). Dodatna 3-dnevna prekinitev zdravljenja ni potrebna, saj menstruacija že šteje kot premor v času uporabe.

Proizvajalec:

DEFLAMED INTERNATIONAL s.r.o.
Heřmanova 597/61
170 00 Praha 7
Češka


Distributer za Slovenijo

PROKSIMUM PHARMA d.o.o.
Pot k sejmišču 26a
1231 Ljubljana-Črnuče
Slovenija

150 ml  (volumen polnjenja)
2 aplikatorja



Uporabno najmanj do konca in številka serije sta navedeni na spodnji strani

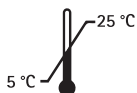

VAGINALNI GEL ZA SPODBUJANJE SPONTANE REMISIJE IN REGRESIJE PRI:

- NEJASNIH IZVIDIH BRISA MATERNIČNEGA VRATU (ASC-US, ASC-H, LSIL, HSIL / PAP II-p, PAP III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID)
- ali
- SPREMENBAH MATERNIČNEGA VRATU, KI JIH POVZROČA HPV
- ali
- P16/Ki-67 POZITIVNIH LEZIJAH MATERNIČNEGA VRATU
- ali
- EROZIJAH MATERNIČNEGA VRATU.

Kako uporabljati ta pripomoček?

1. Postavite plastenko DeflaGyn® na ravno površino. Odvijte pokrovček plastenke. Pritisnite konico aplikatorja na odprto plastenko.
2. Obrnite plastenko DeflaGyn® z vztavljenim aplikatorjem navzdol (180°). Izvlecite 5 ml gela tako, da počasi povlečete bat aplikatorja, dokler ne dosežete oznake 5 ml. Napolnjen aplikator odstranite iz plastenke in plastenko ponovno postavite na površino.
3. Lezite na hrbet, z blazino pod medenico. Vstavite aplikator globoko v nožnico (do materničnega vratu). Najlažje bo, če to storite s pokrčenimi koleno. Ko je aplikator v pravilnem položaju, počasi pritisnite bat, da gel izstisnete, nato pa izvlecite aplikator iz nožnice. Vaginalni gel nanesite najbolje zvečer.
4. Ostanite v tem ležečem položaju približno 1 minuto. Poskrbite, da bo medenica ostala dvignjena. Tako se bo vaginalni gel pravilno porazdelil po materničnem vratu.
5. Po uporabi aplikator temeljito očistite. Ločite cevko in bat aplikatorja. Oba dela umijte ročno s toplo vodo (do 50 °C). Ne uporabljajte pomivalnega stroja. Oba dela aplikatorja posušite in ju ponovno sestavite. Aplikator lahko uporabite do 28-krat, če ga očistite po vsaki uporabi.
6. Odstranjevanje uporabljenega aplikatorja: Očiščen aplikator lahko, če je mogoče, odložite med plastične odpadke za recikliranje ali med gospodinjne odpadke.

