

MHK084 & MHK087

MHK088 & MHK100

Silikonski zbiralnik materinega mleka Haakaa– pikapolonica

Navodila za uporabo

Slovenska

Ime izdelka: Silikonski zbiralnik materinega mleka Haakaa– pikapolonica

Material: Medicinski silikon

Kapaciteta: 2.5 oz./75ml & 5 oz./150ml

Opis izdelka:

Silikonski zbiralnik mleka Haakaa Pikapolonica je odlična alternativa blazinicam za prsi v času dojenja, za vse mame, ki želijo prihraniti vsako kapljico mleka, namesto da jo vpijejo.

Enodelna oblika se pripne na prsi s sesanjem in varno ter diskretno se prileže v nedrčku. Pikapolonica je lahka in nežna, zato ostane varno prisesana na mestu. Ker ne povzroča tvorbe dodatne količine mleka je idealna za mame, ki jim mleko med dojenjem uhaja iz prsi in ga želijo prihraniti, ne da bi povečevale svojo količino.

Pikapolonico lahko med dojenjem nosite na drugi strani, da ujamete mleko, ki vam izteka ali pa jo nosite na vsaki dojki v nedrčku, ko nadaljujete s svojim dnevom. Je popolnoma prenosljiva in ima na dnu majhne nogice, ki stojijo pokonci na kateri koli ravni površini in preprečujejo razlitje po uporabi.

Ko končate z zbiranjem mleka, odprite čep na vrhu in mleko varno prelijte v posodo ali steklenico.

Lastnosti:

- Pritrdite na prsi z nežnim vakuumom, tako da ostane na mestu v nedrčku.
- Narejena je iz mehkega 100% medicinskega silikona
- Enodelna zasnova brez spojev, razpok ali robov, ki bi zadrževale bakterije
- Majhne nogice na dnu omogočajo, da pikapolonica stoji pokonci na ravnih površinah.
- Kabli ali baterije niso potrebni.
- Enostavno vzdrževanje - samo zavrite, da sterilizirate.
- Brez BPA, PVC in ftalata

Čiščenje in vzdrževanje:

Očistite po vsaki uporabi. Sterilizirajte silikonski zbiralnik mleka Haakaa Pikapolonica s katerim koli parnim sistemom za sterilizacijo ali z vrenjem v vodi 2-3 minute. Pri sterilizaciji preverite, ali je čep na vrhu odprt, da preprečite morebitno deformacijo silikona. Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte sredstev za beljenje ali sterilizacijskih tablet. Za čiščenje tega izdelka ne uporabljajte UV sterilizatorjev, saj lahko vplivajo na njegovo življenjsko dobo.

Opozorilo:

- ☒ Redno preverjajte stanje izdelka. Zamenjajte, če izdelek kaže znake poškodb.
- ☒ Ne shranjujte v bližini ostrih predmetov.
- ☒ Za čiščenje tega izdelka uporabite samo krtače z mehкими ščetinami ali mehke gobice. Groba čistilna sredstva lahko opraskajo površino.
- ☒ Ta izdelek ni igrača. Ne uporabljajte za noben drug namen.
- ☒ Izdelek shranjujte na hladnem in suhem mestu ter se izogibajte neposredni sončni svetlobi.

Navodila:

- (a) Čep
- (b) luknjica
- (c) Zbiralnik
- (d) Nogice
- (e) Odprtina

Kako zbrati mleko, ki uhaja iz prsi:

1. Prepričajte se, da je Čep (a) potisnjen v luknjico (b). Prislonite glavno odprtino (e) na sredino bradavice, nežno pritisnite in sprostite zadnji del Pikapolonice, dokler ne začutite sesanja.
2. Pikapolonico je treba vedno nositi v nedrčku, da je varna.
3. Redno odstranjujte Pikapolonico, da shranite materino mleko v skladu s smernicami za varno shranjevanje materinega mleka. Pred shranjevanjem izvlecite čep (a) iz luknjice (b) in mleko skozi luknjico prelijte v posodo.
4. Med dojenjem uporabite svojo pikapolonico na drugi dojki, da ujamete mleko, ki vam izteka ali pa jo nosite na obeh dojkah v nedrčku, ko nadaljujete s svojim dnevom.

Opomba: Vakum je zelo blag in le pomaga ohraniti Pikapolonico v nedrčku. Pikapolonica bo zbirala samo mleko, ki bi se sicer izteklo v blazinice za prsi. Ne bo odvajalo dodatnega mleka.

Poskrbite, da ste seznanjeni s smernicami o varnem shranjevanju materinega mleka, in poskrbite, da boste vašo Pikapolonico redno praznili, da bo shranjevala materino mleko v skladu s temi priporočili.