

MERILNIK KRVNEGA TLAKA NA PERO ARTSANA RR

Navodila za uporabo

Sestavni deli merilnika krvnega tlaka:

- 1 – manšeta
- 2 – stetoskop
- 3 – olivo
- 4 – manometer na pero, merilno območje 20-300 mmHg
- 5 – izpustni ventil
- 6 – puhalo
- 7 – mikrofonski stetoskop



Fizične in psihične obremenitve povzročajo nihanje krvnega tlaka. Pomembno je, da z rednimi meritvami spoznate vaš stalni normalni krvni tlak doma (v bolnišnici ali pri zdravniku je lahko krvni tlak tudi za 30 mmHg višji). Zadostuje, da si dva do trikrat na dan izmerite krvni tlak in tako boste zagotovo pravočasno odkrili znatna odstopanja vašega krvnega tlaka od normalnih vrednosti.

Merjenje krvnega tlaka

Zavijajte rokav leve roke in jo položite s hrbtno stranjo podlahti na mizo ali podobno podlago. Na notranji strani nadlahti (cca. 2 cm nad komolčnim zglobov) si lahko otipate utrip in približno tja nastavite mikrofonski stetoskop.

Manšeto ovijte okoli roke tako, da je med manšeto in roko prostora še za približno dva prsta. obe olivi, ki sta na koncu vilic stetoskopa, si namestite v ušesa.

Med merjenjem morate kolikor je mogoče mirovati. Leva roka mora mirno ležati, z desno pa primite puhalo in zaprite ventil. S puhalom napihujte manšeto, dokler kazalec manometra ne kaže približno 20% višjo vrednost, kot je pričakovana vrednost zgornjega (sistoličnega) tlaka.

Odčitavanje sistoličnega tlaka

Ventil na puhalu odpremo toliko, da je padanje tlaka v sistemu 2 do 4 mmHg na sekundo. Kadar v stetoskopu jasno slišite ritmični utrip pomeni, da je to vas sistolični (zgornji) krvni tlak. Zapomnite si vrednost na manometru, ko ste zaslišali utrip.

Odčitavanje diastoličnega krvnega tlaka

Zrak še naprej uhaja iz manšete in utrip postaja vedno manj slišen. Kakor hitro se utripa ne sliši več, morate odčitati spodnjo (diastolično) vrednost vašega krvnega tlaka.

Merjenje je s tem končano. Ventil odprite do konca, da spustite še preostali zrak iz manšete.

POZOR:

merilnik krvnega tlaka mora biti redno kontroliran in vzdrževan
nikoli ne merimo dvakrat zapored (čas odmora mora biti vsaj 5 minut)

Garancijski list

Izdelek: PIC Merilnik krvnega tlaka na pero RR

Proizvajalec (distributer in uvoznik za EU): Pikdare S.p.A, Via Saldarini Catelli 10, 22070 Casnate con Bernate (CO), Italija

Firma in sedež dajalca garancije (zastopnik, distributer in pooblaščen servisler blagovne znamke PiC): Prolat d.o.o., Praproče 9a, 8210 Trebnje; Tel.: 07-30-44-555; info@prolat.si; servis@prolat.si; www.prolat.si; delovni čas (vsak delavnik med 7:00 in 15:00)

Firma in sedež prodajalca, žig ter podpis*:

Datum dobave blaga*:

*V kolikor je garancijskemu listu priložen račun iz katerega so razvidni zgoraj navedeni podatki, izpolnjevanje tega polja ni potrebno.

GARANCIJSKI POGOJI

Spoštovane stranke!

Garancijska doba traja 2 leti začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za blago, ki je bilo kupljeno na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Dajalec garancije jamči za lastnosti oziroma brezhibno delovanje blaga v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka potrošniku.

Pravice potrošnika: Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom. V primeru, da dajalec garancije potrebuje več časa za popravilo ali zamenjavo blaga, se rok podaljša za največ 15 dni, pri pogoju, da je med določenem 30 dnevem roku o tem obvestil potrošnika. Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec. V primeru, da popravilo ali zamenjava blaga nista mogoča, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine, ki je sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Potrošnik lahko zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim, proizvajalec izda nov garancijski list. Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga. V nasprotnem primeru ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Postopek uveljavljanja garancije: V primeru reklamacij obvestite trgovca/prodajalca oziroma dajalca garancije (pooblaščenega serviserja) navedenega na vrhu tega garancijskega lista po e-pošti na servis@prolat.si ali po telefonu na 07-30-44-555. Reklamirano blago pošljite na naslov pooblaščenega serviserja, ki je enak naslovu dajalca garancije in je naveden na vrhu garancijskega lista in priložite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka) ter razlog reklamacije.

Opozorilo: potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Ob prevzemu blaga, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve.

Dajalec garancije zagotavlja proti plačilu potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate najmanj 3 leta po preteku garancijskega roka. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljiva. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek. Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije.